



### 1 Настройка приложения

Во время настройки необходим безопасный доступ в Интернет

#### 1. Начало работы

- Загрузите приложение iCan Health из App Store или Google Play
- Откройте приложение
- Войдите или создайте учетную запись

#### 2. Настройка

- Следуйте инструкциям в приложении для настройки и сопряжения с передатчиком
- Инструкции по установке датчика приведены в разделе «Установка датчика» ниже

#### 3. Подготовка датчика

В течение двухчасовой подготовки датчик не выдает никакие показания или предупреждения, пока подготовка не будет завершена.

#### 4. Расшифровка результатов CGM

Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству пользователя iCan.

### 2 Установка датчика

#### 1. Сопряжение с передатчиком

- 1a Извлеките модуль передатчика из нижней части коробки модуля датчика.
- 1b Перед сопряжением датчика с передатчиком проверьте первые 8 цифр серийного номера модуля датчика и серийного номера передатчика на соответствие друг другу.
- 1в Откройте приложение и проверьте, включен ли Bluetooth. Отсканируйте QR-код на модуле датчика с помощью приложения

#### 2. Приготовление

- 2a Вымойте руки с мылом и водой
- 2б Выберите место установки на руке или на животе  
**Предостережение:** не устанавливайте датчик на шрамах, родинках, растяжках, шишках и местах инъекций инсулина. Во избежание раздражения кожи меняйте место установки при каждом применении. Учитывайте свое удобство и физическую активность.)
- 2в Очистите место установки спиртовыми салфетками.  
**(Предостережение:** устанавливайте датчик после того, как спирт высохнет.)

#### 3. Применить датчик

- 3a Полностью снимите крышку с модуля датчика
- 3б Установите модуль передатчика на твердую плоскую поверхность. Совместите синюю отметку на аппликаторе датчика с отметкой на подставке передатчика.
- 3в Плотно прижмите аппликатор датчика к подставке до щелчка и до упора.
- 3г Аккуратно поверните предохранительный переключатель со значка «Заблокировано» на значок «Разблокировано» до щелчка и до упора (**Предостережение:** не нажимайте белую кнопку посередине после полного разъединения предохранительного переключателя, чтобы избежать непреднамеренных результатов или травмы)
- 3д Аккуратно потяните приведенный в готовность аппликатор датчика вертикально вверх. (**Предостережение:** не прикасайтесь к клейкой ленте)
- 3е Теперь аппликатор датчика готов к установке.

#### 4. Установка аппликатора датчика

- 4a Установите приведенный в готовность аппликатор датчика на выбранное место
- 4б Нажмите белую кнопку посередине, пока не раздастся звук инъекции
- 4в Аккуратно отведите аппликатор от тела (**Предостережение:** утилизируйте использованный аппликатор в соответствии с местными правилами.)
- 4г Прижмите клейкую ленту вокруг датчика для его надежного прикрепления к коже (**Предостережение:** после установки датчика проверьте место его расположения на наличие кровотечения. Если кровотечение не останавливается, снимите датчик и надавливайте на место кровотечения тампоном из стерильной марли, пока оно не прекратится.)

#### 5. Использование дополнительной накладки (опционально)

После установки сенсора вы можете нанести дополнительную накладку по краям адгезивной наклейки для усиления фиксации

- 5a Осторожно снимите белую защитную пленку. Не прикасайтесь к белой клейкой поверхности.
- 5б Используя цветной язычок, расположите дополнительную накладку вокруг сенсора.
- 5в Разгладьте дополнительную накладку по периметру.
- 5г Используя язычок, удалите цветную защитную пленку.
- 5д Разгладьте дополнительную накладку по периметру.

### 3 Завершение процедуры через 15 дней

#### 1. Снятие датчика

- а. Потяните за край клейкую ленту.
- б. Медленно оторвите клейкую ленту от кожи одним движением.

#### 2. Утилизация

- Утилизируйте использованный датчик в соответствии с местными правилами.

Все изображения являются условными. Ваше изделие может выглядеть иначе

Ознакомьтесь с полными инструкциями по эксплуатации системы и правилами техники безопасности приведенными в Руководстве пользователя iCan.

Руководство пользователя предоставляется в электронном виде. Для загрузки PDF-файла посетите веб-сайт [iCan-cgm.com](http://iCan-cgm.com).

Если вам нужна печатная версия Руководства пользователя, обратитесь к поставщику или отправьте запрос на электронную почту:

[iCansupport@sinocare.com](mailto:iCansupport@sinocare.com). Она будет бесплатно предоставлена в течение семи дней.

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [iCansupport@sinocare.com](mailto:iCansupport@sinocare.com)

\* 红色框不印刷

文件版本	变更时间	变更说明	变更人
A.1	2024.10.15	初版编制（含加固贴）	彭锐
A.2		删除年龄	彭锐

Sinocare三诺			
公司名称	三诺生物传感股份有限公司	须符合HSF检测	
文件名称	CGMS操作指南（白俄罗斯定制版-i3）	文件编号	C-36301929
文件版本	A.2	物料编码	36301929
图文尺寸	展开尺寸：186*372；单面尺寸：93*93	图文比例	1: 1
制作材料	70g轻涂纸，风琴折，标题在正面第一页。 单面彩色印刷，沿虚线折叠，虚线无需印刷	单位	毫米（mm）
编制：	_____彭锐_____	_____年	___月___日
审核：	_____	_____年	___月___日
批准：	_____	_____年	___月___日